

使用说明书

Counseling ▪ Microscope

型号：3R-MSBTVTY



Copyright (C) 3R Group, 3R SOLUTION Corp. Japan. All Rights Reserved. Ver1.

目录

安全警告及注意事项	3
准备	
• 配件清单.....	5
• 各部分名称.....	6
• 遥控按键功能.....	7
设备安装和平板电脑上 Android 系统配置要求	
• 检查端口和更换步骤.....	8
• 在平板电脑上安装专用软件（要求）	8
软件下载	
• 软件下载方式.....	8
启动软件及软件功能	
• 连接本体机身和软件.....	9
• 退出 APP.....	9
APP 的基本操作.....	9
• 1. 倍率模式.....	9
• 2. 标尺功能操作按钮.....	9
• 3. 自动对焦按键.....	10
• 4. 设置按键.....	10
• 5. 拍照按键.....	10
• 6. 录像按键.....	10
• 6. 图片库.....	10
产品规格	11
保修卡	12

安全警告及注意事项

以下符号所表示的内容。



表示不可操作的事项。



为必须遵守的事项。



危险



不可直视 LED 灯。



不可自行分解产品。



本体机身发射无线信号，如在飞机上有可能会引起干扰。
特殊环境下需使用时需和现场责任者进行确认。



警告



充电端子和传感器勿靠近导电性物质。



打雷时若正在充电，需将电源插座拔下。



本品使用温度：5~40℃。如不在此温度范围内会对本体及电池有所损伤。



注意



擦拭布上勿要使用酒精等溶剂进行擦拭。



湿手勿碰触本体。勿落地。保修期间若非自然原因损害，提供有偿维修。



镜头内部不能用手或其他硬物碰触。如有异物附着，会影响画像质量。可用吹气球将异物吹去。



需使用随机附带的适配器进行充电。



使用时，连续使用时间过长会引起机体发热。可关闭一段时间后再使用，否则会影响使用寿命。

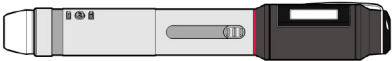


需定期清理直接接触皮肤的镜头部位，用随机附带的擦拭布或眼镜擦拭布。

准备

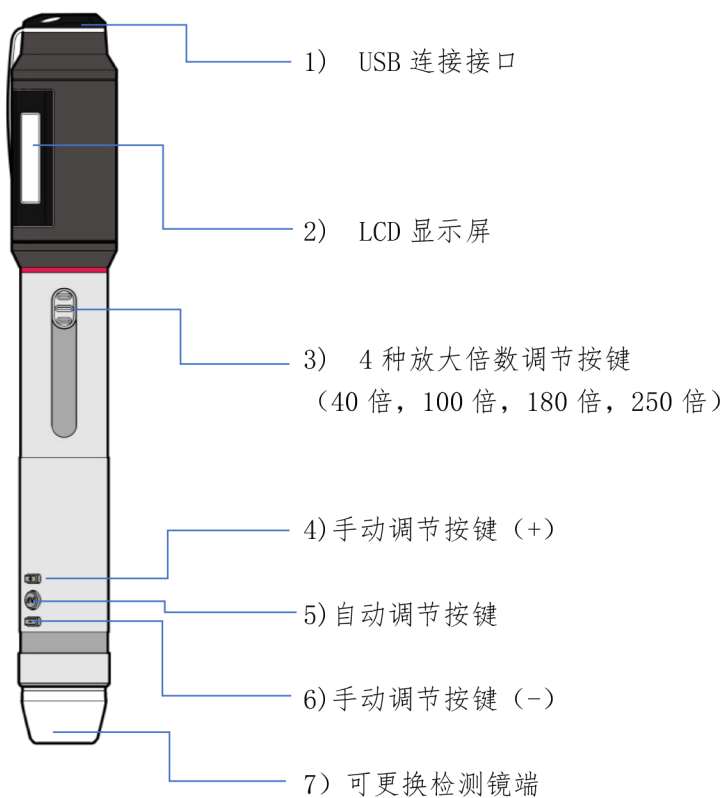
配件清单

☑请确认以下附属品。

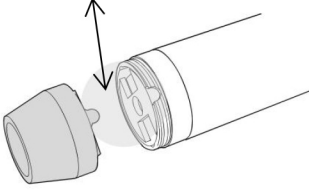
☐ 本体机身	液体对焦本体机身机体。
	
☐ 连接线（PC 端）	连接 PC 显示屏。
	
☐ 连接线（手机，平	连接手机，平板显示屏。
	
☐ 多功能检测端	微小检查镜端。
	
☐ 遥控器	检测遥控机。
	
☐ 擦拭布	机体上有脏污时用擦拭布擦拭。
	
☐ 包装箱	整理收藏所有配件。
	

各部分的名称

本体机身



遥控按键功能	
	图像采取 按按钮时，与软件联动拍照。
	图像处理 坐标尺颜色改变（黑-白-绿-粉-红-黄-蓝） 坐标尺 开/关 单轴/双轴切换
	变焦/旋转 摁按键时，2 倍→3 倍→回到 1 倍 默认影像 摁按键时，屏幕旋转 180 度
	自动对焦 调整焦点对焦近处物体 摁按键时，启动自动对焦功能 调整焦点对焦远处物体
	亮度 把屏幕调暗 默认亮度 把亮度调亮

检测端口更换步骤	
	1. 将连接检测镜端与机身连接的扣环旋转取下，更换检测镜端。
	2. 安装时先将镜端卡槽对准机身缺口处，再将环扣旋转式扣紧即可。

在平板电脑上安装专用软件

Android 系统推荐配置要求	
Android 版本	4.4/5.1/6.0 以上
显示屏尺寸	10.1 英寸
显示屏分辨率	1280x800 (160ppi) 1920x1200 (220-240ppi) 2560x1600 (300-320ppi)
CPU	Quad-Core 1.5GHz
运存	2GB DDR3
内存	16GB
数据传输方式	IEEE802.11b/g/n

软件下载的两种方式：

下载方式一：
 在浏览器中进入官网：www.3r.com.cn；进入应用软件下载页面；
 找到3R-MSBTVTY驱动软件下载并安装后应用

下载方式二：
 使用微信或浏览器扫描对应连接设备的二维码（下载二维码见下页）；
 下载3R-MSBTVTY驱动软件或APP后安装并应用



3R-MSBTVTY (PC端)



3R-MSBTVTY (安卓)

启动软件及软件功能

连接本体机身和软件

- 1) 使用专用连接线连接检测机身与终端显示器。
- 2) 打开已安装“3R Anyty”软件的平板电脑。
- 3) 点击“3R Anyty”  图标打开软件。
- 4) 使用时会显示“是否允许应用“Anyty”使用该 USB 设备？”，请点击“确定”。
- 5) 本体机身检测端口处 LED 亮起时，连接成功。

退出 App

需退出 App 时，可点击平板返回键直接退出。

App 的基本操作

	软件页面左上角显示倍数模式（例：40X）	
		长度测量按钮
		圆形面积测量按钮
		四边面积测量按钮
		角度测量按钮
		返回按钮，重复使用测量按钮时，去除最新打开的测量标尺；即返回上次操作。
		去除键，去除画面中所有测量标尺。

		返回初始界面	
	自动对焦按钮		
	Camera Settings	摄影机设定	 点 击 按 键，案 件 为 绿 色 时，模 式 选 择 成 功
	Select Resolution 选择分辨率	No device Connected 没有装置连接	
	Select Display Size 选择显示尺寸	Fit to Window 适合窗口 Fit to Resolution 合适的分辨率	
	Select Measure Type 选择测量模式	Auto 自动选择模式 1-Type 一模式：简易查看 2-Type 二模式：精密查看	
	System Info	系统信息	
	About Anyty	北京爱迪泰克公司信息	
	拍照按钮，点击即拍照。		
	录像按钮，点击即录像，案件变成红色便是在拍摄中，欲结束拍摄点击红色拍摄按钮，则结束拍摄。		
	图片库，点击查看图片库。		

产品规格

对应 OS	推荐使用 Android/Windows10,8,7;IOS 有功能限制
摄像头	1/3 英寸 CMOS 传感器
倍率	40 倍, 100 倍, 180 倍, 250 倍 (应对 21.5 英寸屏)
观测范围	40 倍: 10.8X6mm 250 倍: 1.8X1mm
图像解析度	2304 X 1536
对焦方式	自动/手动
白平衡	自动
曝光	自动
光源	白色 LEDX6 (标配) 白色 LEDX4 (观察小孔或角落用) ON/OFF
视频解析度	AVI (1920 X1080) 20fps (1280X720, 720X480, 640X480) 30fps
图像解析度	JPG (1920X1080, 1280X720, 720X480, 640X480)
电源	接口: DC5V 320mA (USB 供电)
重量 (约)	89g
尺寸 (约)	176mmX29mmX26mm

保 修 卡

Anyty (艾尼提) 便携式码显微镜在购买之日起 1 年内免费保修 (正常使用情况下)。以下栏目中, 务必填写代理商盖章, 销售人员签字, 购买之日等。(信息不完整, 可能会无法正常维护)

产品型号: _____
姓 名: _____
联系地址: _____
单位名称: _____
电话号码: _____
E-Mail : _____
购买日期: _____
经 销 商: _____
销售代表签字: _____

3R 集团 北京愛迪泰克科技 (北京) 有限公司	
3R Eddytek Corp. Beijing	
艾尼提 Anyty China	免费咨询电话 400-680-6765
www.3r.com.cn	info@3r.com.cn
电话 010-6204-1107	传真 010-6296-4089

为了给您提供更好的售后服务, 希望填入上述内容后, 扫描或传真 010-62041107, 谢谢合作!

Anyty

Any time is YES!